

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте наружные поверхности держателя теплой мыльной водой. При необходимости наружные поверхности обрабатывайте дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению на территории РФ.

После чистки и дезинфекции вытирайте наружные поверхности дозатора насухо. Не используйте абразивные средства для чистки дозатора.

При использовании жидкого мыла возможно засорение клапанов дозатора. Для промывки дозатора, необходимо разобрать флакон с дозатором, залить во флакон горячую воду (60-70 °С) и произвести многократные нажатия на рычаг до восстановления нормальной работы дозатора.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации держателя 18 месяцев со дня продажи.
- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет держатель по предъявлению настоящего руководства с отметками о дате продажи. По окончании гарантийного срока осуществляет ремонт при условии оплаты его стоимости.

Гарантия предприятия-изготовителя не распространяется на дефекты, причиной которых послужили:

- несоблюдение покупателем правил эксплуатации и технического обслуживания держателя, в том числе – использование не по прямому назначению или для работы с непредусмотренным сырьем;
- механическое, химическое или иное постороннее воздействие, не предусмотренное условиями эксплуатации;
- самостоятельное, несогласованное с предприятием-изготовителем, переоборудование держателя, внесение в его конструкцию изменений или самостоятельный ремонт.
- В случае использования держателя третьим лицом, ответственность за соблюдение им требований, установленных настоящим руководством, несет сам покупатель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настенного держателя флакона с упором (локтевой рычаг)

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ года

Отметка ОТК

ТД «ИНТЕКРОН»
РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей 72,
тел.: 8(8362) 73-26-00, e-mail: info@intecron-trade.ru



НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАКОНА С УПОРОМ (ЛОКТЕВОЙ РЫЧАГ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Держатель предназначен для подачи мелких порций (2,5 мл) моющих и дезинфицирующих средств (кожные антисептики, жидкое мыло) из пластмассовых флаконов для мытья или дезинфекции рук в специализированных помещениях лечебно-профилактических учреждений любого профиля, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, детских учреждениях, предприятиях пищевой промышленности, местах общественного пользования, в быту и т. д.



Держатель создает удобство пользования, снижает расход моющих или дезинфицирующих средств, а также обеспечивает повышение санитарно-гигиенических требований по сравнению с наливом из флаконов.

Держатель оборудован локтевым рычагом, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» от 18 мая 2010 г. (с изменениями на 10 июня 2016г).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ручной привод дозирующего устройства
2. Режим работы – многократный, циклический
3. Усилие нажатия на рычаг от 5Н (0,5кг).
4. Масса устройства 0,488 кг.
5. Габаритные размеры: 286х100х94,4
6. Габаритные размеры флакона указаны на схеме 1.

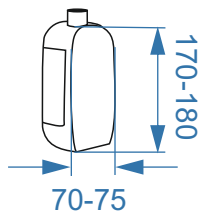


Схема 1.
Размеры флакона
(высота/глубина)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | | |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Держатель флакона локтевой | 1 шт. |
| 2. | Дозатор | 1 шт. |
| 3. | Шуруп с дюбелем | 3 шт. |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5. | Коробка | 1 шт. (на 6 держателей) |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Закрепите держатель на стене при помощи входящих в комплект шурупов (разметка крепежных отверстий показана на схеме 2).

Перед установкой держателя обратите внимание на следующее:

- держатель должен быть расположен над раковиной или поддоном для стекания капель с мокрых рук;
- над держателем должно быть свободное пространство не менее 7 см для снятия его со стены;
- рекомендуемая высота подвеса держателя 130-135 см от пола до верха корпуса.

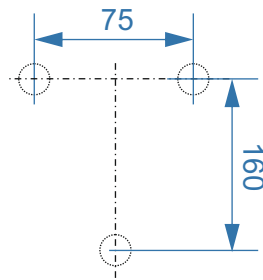


Схема 2.
Крепежные отверстия

УСТАНОВКА ФЛАКОНА

1. Открутите/снимите крышку дозатора с флакона
2. Просуньте снизу через отверстие выступа горлышко флакона и, удерживая его, накрутите на резьбу горлышка крышку дозатора (рис.1-рис.2- рис. 3)
3. Произведите несколько нажатий на рычаг для заполнения насосной системы, до появления первой порции жидкости из дозатора (рис.4). После этого устройство готово к работе

*Нажатие на рычаг при хирургической обработке рук производить только локтем.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4